

D.A.S.T. 乱用薬物スクリーニング検査

Drug of Abuse Screening Test

海外(主にアメリカ・ヨーロッパ)で使用されている乱用薬物検査キットのご紹介です。簡単・迅速・正確・そして安価な製品で、コスト削減・素早い検査が高く評価されています。米国FDA/ユーロCEによりIVD(In Vitro diagnostics)「体外診断用医薬品」の認証を受けた製品です。

*医療機関向け以外は、同一品番型番違いの製品を供給

健康で安全な組織づくりに、
Mediphar-supplyはリスクマネジメントをサポートします。



2024年6月 吉日

お客様各位

株式会社アイテム
代表取締役 田之上 俊朗

乱用薬物検査キットのご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

株式会社アイテムでは 2009 年から米国 WHPM 社の日本代理店として、「STAT™ 乱用薬物スクリーニング検査キット」の輸入販売を開始し、官公庁、エアライン、原子力発電所、鉄道・バス・船舶等の公共輸送機関、医療機関、派遣業、警備業、建設業、プロスポーツ界、大学等の幅広い分野でご愛顧を頂いております。

また、2024 年から STAT- HAIR TEST (毛髪検査) “過去 90 日分の薬物使用歴が検出できる毛髪検査システム” 及び、ドイツ SECURE-TECH 社の日本代理店として、官公庁(交通警察・税関・軍隊・法務局) 向けの「唾液・口腔液を検体とする検査キット」の販売を開始いたしました。

STAT⁺DIP

SDP-2104

STAT DIP™

尿(Urine)によるスクリーニング検査と麻薬使用痕跡・残薬量の迅速検出(SWEEP)ができます。

SWEEP検査の手順

麻薬類が使用された可能性が高い部屋、テーブルや家具、自動車等を、清浄水に浸したガーゼ等で拭き、その絞り汁をSTAT DIP™で検査します。

検査パネルの反応によりどの種類の麻薬が使われたか、特定することが可能です。



検査手順

STEP 1

1. 検体採取

2. 検体処理

3. 検体分析

STEP 2

1. 検体採取

2. 検体処理

3. 検体分析

One-step Drug Test

STAT⁺DIP

Store at any temperature from 4 °C - 30 °C (39 °F - 86 °F)

ITEMS INC.

Security, police & military Equipment' Sales

株式会社アイテム

〒113-0022 東京都文京区千駄木3-1-17

TEL:03-6275-0841 FAX:03-6275-0843

URL: <https://items-inc.com/>

Mail: info@items-inc.com

Items Inc.

3-1-17 Sendagi, Bunkyo-ku, Tokyo113-0022, JAPAN

Phone: +81-3-6275-0841 Fax: +81-3-6275-0843

料金別納
郵便

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1-2-3

レオ新宿608

東京クリニック

院 長 様

サンプル
在中

【薬物検査キット】のアイテムより特別なお知らせで